


NuKom – Tale til oversatte sidesæt

Der findes nu 66 oversættelsessprog i Mind Express. Det betyder at man automatisk kan oversætte ethvert sidesæt til disse sprog, se vejledning til at oversætte sidesæt.

Hvis der findes en talesyntese til det sprog man oversætter til, så kan man være kørende på ganske få minutter.

Listen og talesyntesprog finder man i Menu->Indstillinger->Tale og ved at klikke på *Installer flere stemmer*. Vælg en stemme her og den bliver downloadet. Installer derefter stemmen og genstart Mind Express.

Nu skal stemmen kunne findes samme sted

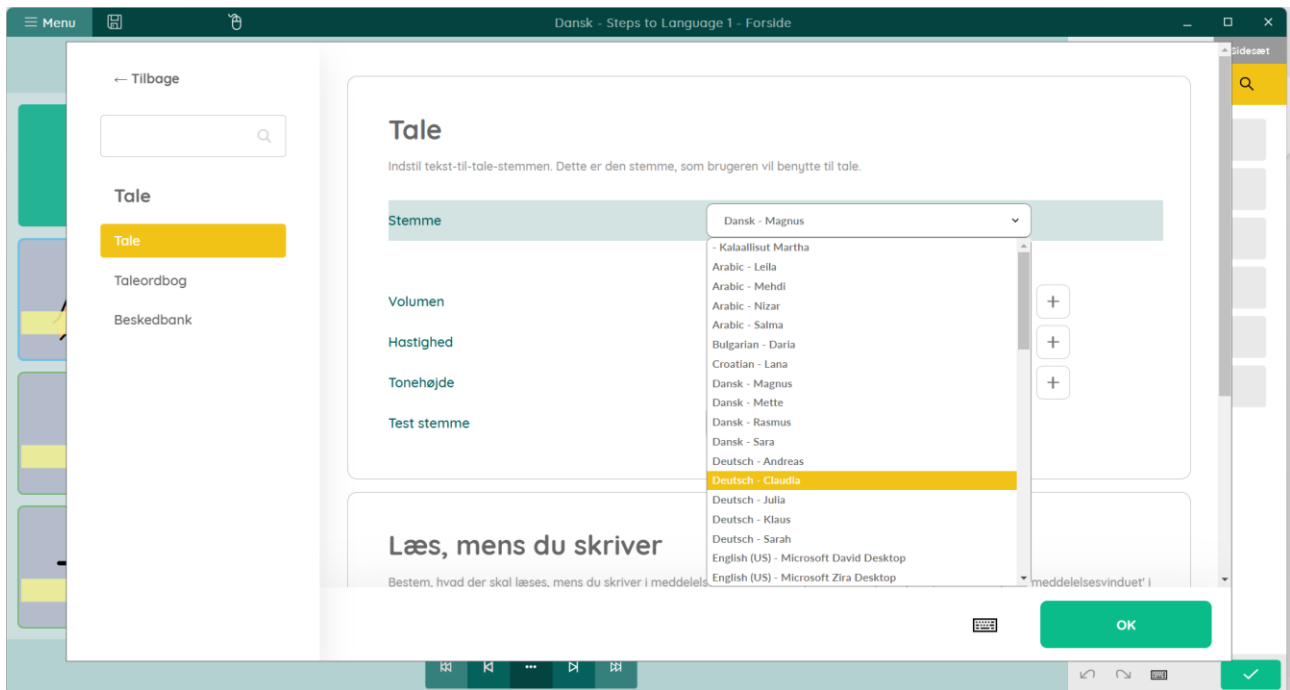

Hvis der ikke findes en stemme til det sprog du vil oversætte et side sæt til, så er eneste mulighed at man indtaler tale på hver enkelt knap i sidesættet. Hvis det er et mindre symbolsidesæt, så er det en overkommelig opgave.

Man indtaler ordene på knapperne således:

1. Åben sidesættet og gå i Redigering
2. Marker knappen og klik på Tilføj handling
3. Skriv "lydop" i søgefeltet og vælg Lydoptagelse og klik OK
4. Klik på optageknappen og indtal. Hvis du før har indtalt det samme ord eller sætning, så kan du bare vælge den i Listen og klikke ok.
5. Optag indtil du er tilfreds med optagelsen og navngiv ved at klikke på blyanten.
6. Klik ok og fortsæt til næste knap.

Bemærk at der måske ligger en talehandling på dansk på hver knap. I nogle tilfælde kan det være praktisk at både den danske og den indtalte stemme på fremmedsproget oplæses.